


GUÍA DE RECOGIDA DE MUESTRAS

- Cómo cargar el aplicador de TSU -

Las unidades de muestreo de tejido (TSU) deben almacenarse a temperatura ambiente antes de su uso (por un período máximo de 12 meses).

Se debe tener cuidado de no exponer el producto no utilizado a temperaturas extremas de calor o frío antes de la recogida de muestras.

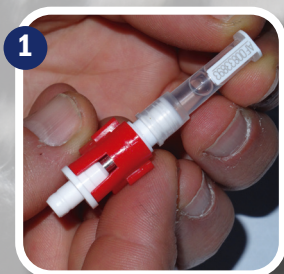

1
Extraiga la unidad de muestreo de tejido (TSU) del embalaje. Las unidades deben estar montadas en una pieza: si se ha desprendido, vuelva a ensamblarlas.



2
Asegúrese de que el retenedor del tubo en la base de la pistola aplicadora está abierto. Empuje el clip de retención para abrirlo.



3
Introduzca la unidad de muestreo de tejido (TSU) en la pistola aplicadora como se muestra. Suelte el clip para bloquear la unidad de muestreo en el dispositivo.



4
Apretar con cuidado el mango de la pistola aplicadora, guiando la punta de la unidad de tejido (TSU) en su lugar si es necesario. Cuando esté completamente colocado, el perno de la pistola aplicadora se apoyará firmemente contra el clip de plástico rojo.



5
Suelte el mango de la pistola aplicadora.



6
Retire el clip de plástico rojo tirando tirando de él hacia fuera. **TENGA CUIDADO DE NO CORTARSE CON LA CUCHILLA DE METAL, ESTÁ MUY AFILADA.**

La pistola aplicadora ya está cargada y lista para tomar una muestra de tejido. Todas las piezas son de uso único. No reutilice las cuchillas de metal.

ABS Progenex

Email: ABS-Progenex@genusplc.com


Web: www.absglobal.com/es/

Teléfono: 91 483 49 30 Fax: 91 510 09 89



GUÍA DE RECOGIDA DE MUESTRAS

- Cómo tomar la muestra -

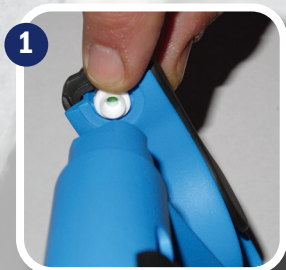

1 Asegúrese de que la pistola aplicadora está cargada con una unidad de muestreo de tejido (TSU) sin usar.



Nota: El émbolo rojo es visible en las unidades de muestreo de tejido (TSU) usadas.



2 Deslice la pistola aplicadora sobre la oreja y coloque el cortador a unos 2,5 cm del borde de la oreja, teniendo cuidado de evitar cualquier venas y pliegues.



Extraer la muestra de esta zona: aproximadamente a unos 2,5 cm de la cabeza y a 5 cm del borde de la oreja.



3 Apriete las asas para tomar una muestra y luego suelte para liberar la oreja. Intente hacer esto en un movimiento rápido y fluido. Muévase con el animal y no luche contra sus movimientos.



4 Retire la unidad de muestreo de tejido (TSU) de la pistola aplicadora.



5 Compruebe que el muestreo se ha realizado con éxito. Si no es así, deseche la muestra y vuelva a tomar la muestra con una nueva unidad de muestreo de tejido (TSU).



6 Retire el cortador usado de la pistola aplicadora separando los mangos. Esto aflojará el cortador. Deséchelo de forma segura. **PRECAUCIÓN: TENGA CUIDADO DE NO CORTARSE CON LA CUCHILLA DE METAL, ESTÁ MUY AFILADA.**

Una vez extraída la muestra de tejido, hay que tener cuidado de conservar el producto a temperatura ambiente.

Los mejores resultados se obtienen cuando las muestras se analizan antes del plazo de un año tras la recogida de la muestra.

Puede ver un vídeo del proceso de carga de la pistola y recogida de muestras aquí



ABS Progenex

Email: ABS-Progenex@genusplc.com

Web: www.absglobal.com/es/

Teléfono: 91 483 49 30 Fax: 91 510 09 89

